

Cévní katétry a jiný cizorodý materiál (kanyly, drény, intrauterinní tělísko)

Bakteriologická vyšetření

Účel odběru:

Identifikace bakteriálního agens na cizorodém materiálu.

Odběrová souprava:

zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem (sputovka)

zkumavka sterilní 10 ml

Odběr:

- **Katétry, kanyly, drény:** pomocí sterilních nůžek a sterilní pinzety se odstříhne cca 5 cm vyšetřovaného materiálu a asepticky se přenesse do sterilní zkumavky nebo nádoby s větším objemem bez kultivačních roztoků a médií **Intrauterinní tělísko (IUD):** IUD se asepticky přenesse do sterilní sputovky bez kultivačního média Materiál je nutno odeslat do laboratoře co nejdříve (do 24 hodin) a do té doby uchovávat při pokojové teplotě.